



ZAMST A2-DX (ORTEZA STAWU SKOKOWEGO) INSTRUKCJA UŻYCIA

PL

Dziękujemy za zakup produktu Zamst. Ze względów bezpieczeństwa przed użyciem proszę przeczytać niniejszą instrukcję. Należy ją przechowywać tak, aby w każdej chwili można z niej było łatwo skorzystać.

Podstawowe informacje:

- Ten produkt jest przeznaczony do stabilizacji stawu skokowego.
- Ten produkt ma kształt anatomiczny dopasowany do kształtu lewego i prawego stawu skokowego.
- Należy wybrać prawidłowy rozmiar i stosować zgodnie z instrukcją, w przeciwnym razie produkt może nie działać prawidłowo.
- Produkt należy do grupy wyrobów medycznych stosowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub złagodzenia skutków urazu.

Podczas korzystania z produktu:

- Ze względu na właściwości materiałów użytych w tym produkcie, kolor może ulec zmianie w zależności od warunków przechowywania.
- Podczas przechowywania produktu należy unikać nadmiernego obciążania zapieć na rzepy lub wypukłości tkaniny. W przeciwnym razie rzepy mogą nie działać skutecznie.
- Nie należy nosić produktu podczas prowadzenia pojazdu. Może to mieć negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdu.

Środki ostrożności podczas użycia – przeczytaj koniecznie:

Środki ostrożności podzielono na dwie grupy, według stopnia ryzyka dla zdrowia.

⚠ OSTRZEŻENIE: dotyczą sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, które mogą spowodować poważny uraz.

⚠ UWAGA: dotyczą sytuacji mniej niebezpiecznych, które mogą spowodować łagodne urazy i/lub uszkodzenie produktu.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Aby zapobiec urazom lub zaostrzeniu objawów, produktu nie powinny stosować:
 - osoby ze skłonnością do alergii lub wrażliwą skórą.
 - osoby, u których występuje złamanie, skaleczenie, drętwienie, obrzęk, egzema, wysypka skórna inne objawy w miejscu noszenia produktu.
 - Nieprawidłowe stosowanie produktu może powodować problemy z krążeniem krwi lub kontuzje.
- Zawsze należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać produktu w prawidłowy sposób:
 - produkt przeznaczony jest do noszenia wyłącznie na kośćczyne dolnej w miejscu stawu skokowego;
 - zawsze należy stosować produkt w odpowiednim rozmiarze;
 - nie stosować produktu podczas snu;
 - zakładając ortezę we właściwy sposób, przestrzegaj kolejności kroków zawartej w instrukcji;
 - jeśli nosisz produkt przez dłuższy czas, dopasuj go w razie potrzeby. Stosowanie stałego ucisku przez dłuższy czas może powodować problemy ze skórą i/lub układem krążenia;
 - korzystając z produktu należy zakładać go w prawidłowej orientacji (górną/dół, wewnątrz/na zewnątrz, przód/tył);
 - aby prawidłowo korzystać z produktu, należy postępować zgodnie z instrukcjami zakładania.
 - ortezę i paski nie wolno zapinać zbyt ciasno;
 - jeżeli orteza rozluźni się lub spadnie podczas użycia, trzeba go znów prawidłowo zapiąć. Przy dłuższym noszeniu trzeba zwrócić uwagę, aby siła ucisku była odpowiednia, a w razie potrzeby należy ją dostosować.
 - jeżeli produkt nosi ślady zużycia, uszkodzenia albo zapieć na rzep nie działa dobrze, produktu tego nie należy używać;
 - nie wolno samemu zmieniać ani naprawiać produktu.
- W przypadku jeśli podczas korzystania wystąpi którakolwiek z poniższych nieprawidłowości, należy natychmiast zaprzestać korzystania z niego i skonsultować się z lekarzem:
 - jeśli produkt powoduje dyskomfort;
 - jeśli w miejscu noszenia produktu wystąpi uraz, złamanie, skaleczenie, ból, drętwienie, obrzęk, egzema, wysypka, itp.

⚠ UWAGA

- Zapieć na rzepy wyprodukowano z twardych materiałów. W rzadkich przypadkach może dojść do obtarć skóry na palcach lub w innym miejscu więc należy zachować ostrożność podczas używania produktu.
- Produkt należy nosić na skarpetce. Nie należy nosić go bezpośrednio na skórze.
- Pod wpływem potu lub tarcia kolor produktu może wyblaknąć, a produkt może zafarbować inne tkaniny.
- Upewnij się, że zapieć na rzep nie przyklepiło się do ubrania. W przeciwnym razie może ono zaciągnąć lub uszkodzić tkaninę.

! Pielęgnacja i pranie

⚠ UWAGA

- Nie prać w jasnymi kolorami. Produkt może stracić kolor lub zafarbować inne tkaniny.
- W przypadku prania produktu razem z odzieżą itp. należy użyć siatki do prania, aby zapobiec zaciągnięciu lub uszkodzeniu tkaniny.


- Produkt można prać w pralce, w siateczce do prania. Po wypraniu suszyć w zacienionym miejscu.
- Podczas prania zapieć na rzep musi być zapięte – w przeciwnym wypadku może ono ulec uszkodzeniu.
- Nie stosować żelazka ani wybielaczy na bazie chloru. Można stosować wybielacz tlenowy.
- Nie suszyć w suszarce bębnowej - może to spowodować uszkodzenie produktu.
- Nie czyścić chemicznie. Można prać na mokro bez suszenia w suszarce bębnowej.

I Sposób użycia


• Przed założeniem należy uważnie przeczytać sekcję "środkii ostrożności przed użyciem". Następnie postępuj zgodnie z podanymi krokami, aby upewnić się, że produkt jest prawidłowo zamocowany.

- Poniższe kroki dotyczą prawego stawu skokowego. Te same kroki należy wykonać dla lewego stawu skokowego.

1. Odpiąć wszystkie zapięcia rzep. Zidentyfikować górną/dolną, wewnętrzną/zewnętrzną oraz przednią/tylną część produktu.

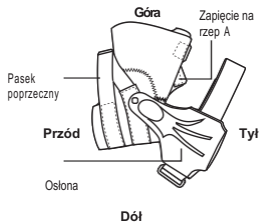

Strona wewnętrzna


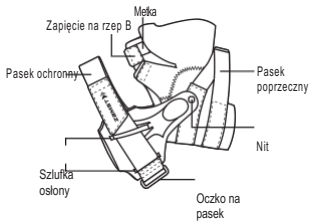


Strona zewnętrzna

Upewnij się, że pasek ochronny jest zapięty.


* Nie ma potrzeby odłączania paska ochronnego od oczka na pasek podczas zakładania lub zdejmowania produktu.

2. Ustaw kostkę pod kątem prostym, otwórz tylne wejście produktu i wsuń stopę w otwór od tyłu.

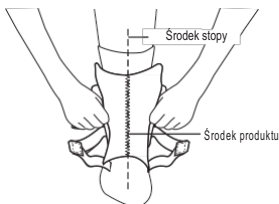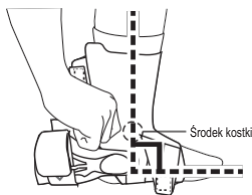


Wsuń stopę do produktu od tyłu, aż kostka znajdzie się w jednej linii z obszarem oznaczonym przerywaną linią. Znajduje się on bezpośrednio nad nitem na oryginalnym ochraniaczu.

3. Zapięcia na rzep A.

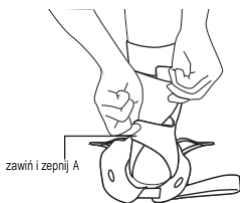


Przytrzymaj zapięcie na rzep A lewą ręką oraz przytrzymaj koniec produktu prawą ręką, tak aby się skrzyżowały. Połóż stopę na podłodze, ustawiając kostkę pod kątem 90 stopni. Owiń po przekątnej wspornik wokół kostki, pociągając zapięcie na rzep A i zapinając je.

4. Zapięcia na rzep B.

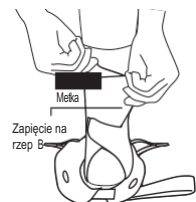


Przytrzymaj zapięcie na rzep B prawą ręką i przytrzymaj zakładkę lewą ręką, tak aby się skrzyżowały. Owiń produkt wokół kostki po przekątnej, pociągając zapięcie na rzep B i zapinając je.

5. Dociśnij paski krzyżowe.

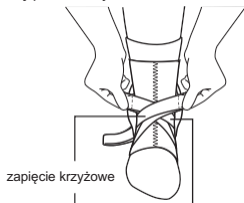

Skrzyżuj oba paski krzyżowe, ciągnąc je w przeciwnych kierunkach przed stopą i przymocuj zapięcia na rzepy powyżej kostki po przeciwnych stronach.


6. Przymocuj oryginalne osłony do głównego korpusu produktu.

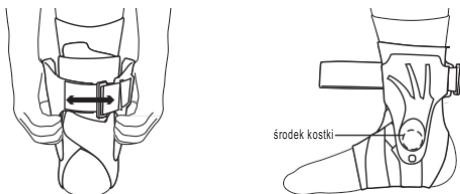

Właściwe ułożenie

Podnieś osłony do pozycji pionowej. Ustaw je w taki sposób, aby obszar na osłonie (bezpośrednio nad nitem) znalazł się nad kostką (wskazana przerywanym okręgiem), jednocześnie dostosowując długość tylnej pozycji górnego paska. Przymocuj rzepy po wewnętrznej stronie każdej osłony do głównego korpusu produktu.

7. Zawini pasek ochronny.

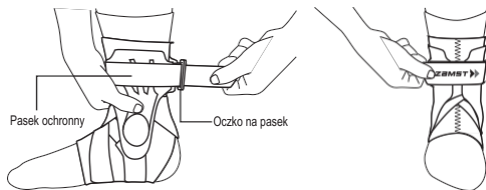


Użyj jednej ręki, aby zapobiec przesuwaniu się ochraniacza. Owini pasek ochraniacza wokół kostki i przełóż go przez oczko. Zawini pasek do tyłu i zapnij go na rzep.

* Nie należy zbyt mocno zaciskać pasków, ponieważ może to spowodować ograniczenie dopływu krwi do stopy lub doprowadzić do problemów ze skórą i/lub układem krążenia.

8. Upewnij się, że produkt nie jest luźny ani nie odstaje. Jeśli odczuwasz dyskomfort, powtórz kroki od początku, aby ponownie zamocować produkt.

Prawidłowo założony produkt (prawa stopa)

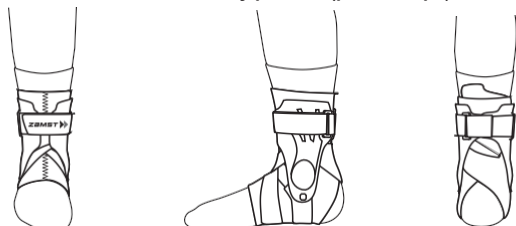

<widok od przodu>


<widok od środka>

<widok od tyłu>

* Na ilustracji logo jest skierowane do przodu. Logo nie zawsze znajduje się na środku. Jego położenie może się różnić w zależności od użytkownika.

* W razie potrzeby wyreguluj pasek z logo, aby zapewnić dokładne dopasowanie.

Do produktu dołączone są dwie miękkie podkładki dystansowe. Wykorzystaj je, jeśli oryginalne osłony lub nity uciskają stopę i powodują dyskomfort.

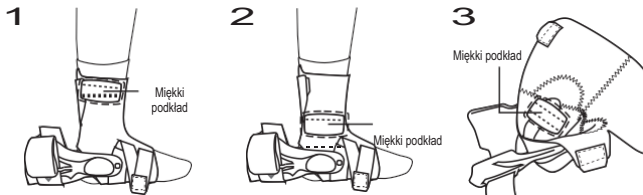

- 1 Jeśli miejsce ucisku znajduje się w górnej części stopy, zamocuj miękką podkładkę dystansową w górnej części ochraniacza.
- 2 Jeśli miejsce ucisku znajduje się na kostce, zamocuj element dystansowy na górnej części kostki.
- 3 Jeśli nit uciska stopę, zamocuj element dystansowy wewnątrz.

Reklamacje i skargi:

W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących produktu należy skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą. Powiadomienie producenta i właściwego organu państwa członkowskiego jest konieczne tylko w przypadku poważnych incydentów, które mogą prowadzić do znacznego pogorszenia stanu zdrowia lub śmierci. Poważne incydenty są zdefiniowane w art. 2 nr 65 rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR).

Zastrzeżenia:

* Specyfikacja i wygląd produktu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia, aby go udoskonalić.

* Wyrzucając produkt należy przestrzegać wszystkich krajowych przepisów dotyczących utylizacji.

* Podejmujemy wszelkie działania, aby zapewnić jakość naszych produktów. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad itp. prosimy o kontakt z Nippon Sigmax Co., Ltd.

Nazwa „ZAMST” i logo firmy „ZAMST” są znakami towarowymi firmy Nippon Sigmax Co. Ltd, które są zastrzeżone w Japonii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach.