



ZAMST A2-DX (ORTEZA STAWU SKOKOWEGO) INSTRUKCJA UŻYCIA

PL

Dziękujemy za zakup produktu Zamst.

Ze względu na bezpieczeństwo przed użyciem proszę przeczytać niniejszą instrukcję. Należy ją przechowywać tak, aby w każdej chwili można z niej było łatwo skorzystać.

Podstawowe informacje:

- Ten produkt ma kształt anatomiczny dopasowany do kształtu lewego i prawego stawu skokowego.
- Przy pewnym stopniu zużycia produkt może nie zapewniać efektu stabilizującego.
- Produkt należy do grupy wyrobów medycznych stosowanych w celu zabezpieczenia przy zapobieganiu urazom lub łagodzeniu skutków urazu.

Podczas korzystania z produktu:

- Ze względu na właściwości użytych materiałów produkt w niektórych warunkach przechowywania może zmienić kolor.
- Dbaj, aby nie odkształcić produktu kładąc na nim cięższe przedmioty podczas przechowywania – może to uszkodzić zapięcie na rzep.
- Nie pozostawiaj produktu w zbyt gorących lub wilgotnych miejscach. Może to spowodować pogorszenie jakości produktu lub jego rozwarstwienie.
- Ze względu na rodzaj użytego materiału na powierzchni produktu mogą powstać drobne zagłębienia, a jego kolor może ulec zmianie. Nie obniża to jakości produktu.

Środki ostrożności podczas użycia – przeczytaj koniecznie:

Środki ostrożności podzielono na dwie grupy, według stopnia ryzyka dla zdrowia.

⚠ OSTRZEŻENIA: dotyczą sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, które mogą spowodować poważną kontuzję.

⚠ UWAGI: dotyczą sytuacji mniej niebezpiecznych, które mogą spowodować łagodne kontuzje i/lub uszkodzenie produktu.

⚠ OSTRZEŻENIA

- Aby zapobiec kontuzji lub zaostrzeniu objawów, produktu nie powinny stosować:
 - osoby ze skłonnością do alergii lub wrażliwą skórą.
 - osoby, u których występuje złamanie, skaleczenie, drętwienie, obrzęk, egzema, wysypka skórna inne objawy w miejscu noszenia produktu.
- Nieprawidłowe stosowanie produktu może powodować problemy z krążeniem krwi lub kontuzje. Zawsze należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać produktu w prawidłowy sposób:
 - Produkt przeznaczony jest do noszenia wyłącznie w miejscu stawu skokowego;
 - Zawsze należy stosować produkt w odpowiednim rozmiarze;
 - Nie stosować produktu podczas snu;
 - Aby założyć ortezę we właściwy sposób, przestrzegaj kolejności kroków przy jego zakładaniu;
 - Ortezę i paski nie wolno zapinać zbyt ciasno.
 - Jeżeli orteza rozluźni się lub spadnie podczas użycia, trzeba go znów prawidłowo związać. Przy dłuższym noszeniu trzeba zwrócić uwagę, aby siła ucisku była odpowiednia, a w razie potrzeby należy ją dostosować.
 - Jeżeli produkt nosi ślady zużycia, uszkodzenia albo zapięcie na rzep nie działa dobrze, produktu tego nie należy używać.
 - Nie wolno samemu zmieniać ani naprawiać produktu.
- W przypadku, gdy podczas użycia produktu wystąpi nietypowa sytuacja taka jak uraz, złamanie, ból, drętwienie, obrzęk, egzema, itp., natychmiast przestań używać produktu i skonsultuj się z lekarzem. Dalsze użycie może zaostrzyć objawy.

⚠ UWAGI

- Zapięcie na rzepy wyprodukowano z twardych materiałów. W rzadkich przypadkach może dojść do skaleczenia skóry na palcach lub w innym miejscu więc należy zachować ostrożność podczas używania produktu.
- Pod wpływem potu lub tarcia kolor produktu może wyblaknąć, a produkt może zafarbować inne tkaniny.
- Upewnij się, że zapięcie na rzep nie przyczepiło się do ubrania. W przeciwnym razie może ono zaciągnąć lub uszkodzić tkaninę

! Pielęgnacja i pranie

⚠ UWAGA

- Nie prać w jasnymi kolorami. Produkt może stracić kolor lub zafarbować inne tkaniny.
- W przypadku prania produktu razem z odzieżą itp. należy użyć siatki do prania, aby zapobiec zaciągnięciu lub uszkodzeniu tkaniny.


- Produkt można prać w pralce, w siateczce do prania. Po wypraniu suszyć w zacienionym miejscu.
- Podczas prania zapięcie na rzep musi być związane – w przeciwnym wypadku może ono ulec uszkodzeniu.
- Nie stosować wybielaczy na bazie jonów lub chloru. Można stosować wybielacze tlenowe.
- Nie suszyć w suszarce bębnowej - może to spowodować uszkodzenie produktu.
- Nie czyścić chemicznie. Można prać na mokro bez suszenia w suszarce bębnowej.

I Sposób użycia

• Przed założeniem należy uważnie przeczytać sekcję "Środki ostrożności dotyczące użytkowania". Następnie postępuj zgodnie z podanymi krokami, aby upewnić się, że produkt jest prawidłowo zamocowany.


- Poniższe kroki dotyczą prawego stawu skokowego. Te same kroki należy wykonać dla lewej kostki.

1. Odpiąć wszystkie zapięcia rzep. Zidentyfikować górną/dolną, wewnętrzną/zewnętrzną oraz przednią/tylną część produktu.

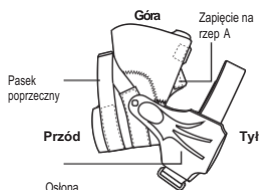

Dół

Strona wewnętrzna


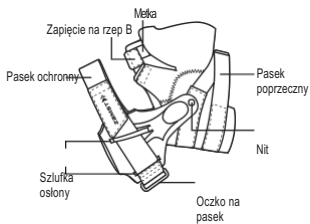


Strona zewnętrzna

Upewnij się, że pasek ochronny jest zapięty.


* Nie ma potrzeby odłączania paska ochronnego od oczka na pasek podczas zakładania lub zdejmowania produktu.

2. Ustaw kostkę pod kątem prostym, otwórz tylne wejście produktu i wsuń stopę w otwór od tyłu.

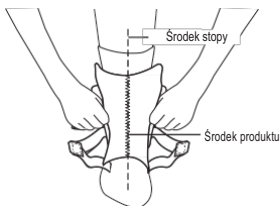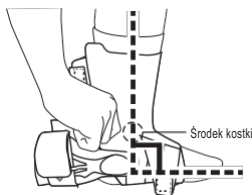



Wsuń stopę do produktu od tyłu, aż kostka znajdzie się w jednej linii z obszarem oznaczonym przerywaną linią. Znajduje się on bezpośrednio nad nitem na oryginalnym ochraniaczu.

3. Zapięcia na rzep A.

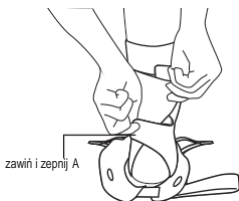


Przytrzymaj zapięcie na rzep A lewą ręką oraz przytrzymaj koniec produktu prawą ręką, tak aby się skrzyżowały. Połóż stopę na podłodze, ustawiając kostkę pod kątem 90 stopni. Owiń po przekątnej wspornik wokół kostki, pociągając zapięcie na rzep A i zapinając je.

4. Zapięcia na rzep B.

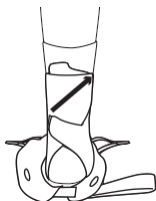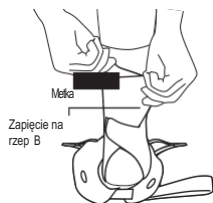


Przytrzymaj zapięcie na rzep B prawą ręką i przytrzymaj zakładkę lewą ręką, tak aby się skrzyżowały. Owiń produkt wokół kostki po przekątnej, pociągając zapięcie na rzep B i zapinając je.

5. Dociśnij paski krzyżowe.

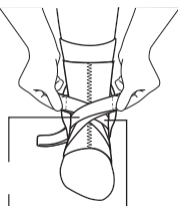

Skrzyżuj oba paski krzyżowe, ciągnąc je w przeciwnych kierunkach przed stopą i przymocuj zapięcia na rzepy powyżej kostki po przeciwnych stronach.


6. Przymocuj oryginalne osłony do głównego korpusu produktu.

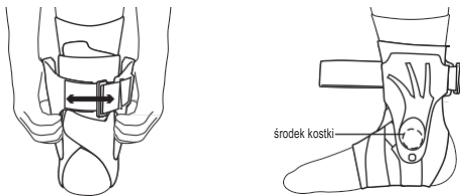

Właściwe ułożenie

Podnieś osłony do pozycji pionowej. Ustaw je w taki sposób, aby obszar na osłonie (bezpośrednio nad nitem) znalazł się nad kostką (wskazana przerywanym okręgiem), jednocześnie dostosowując długość tylnej pozycji górnej paska. Przymocuj rzepy po wewnętrznej stronie każdej osłony do głównego korpusu produktu.

7. Zawinię pasek ochronny.

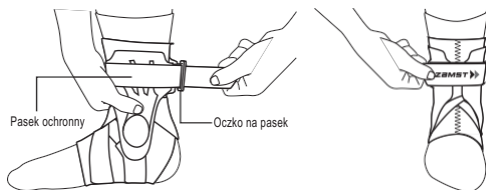


Użyj jednej ręki, aby zapobiec przesuwaniu się ochraniaczy. Owiń pasek ochraniacza wokół kostki i przełóż go przez oczko. Zawinię pasek do tyłu i zapnij go na rzep.

* Nie należy zbyt mocno zaciskać pasków, ponieważ może to spowodować ograniczenie dopływu krwi do stopy lub doprowadzić do problemów ze skórą i/lub układem krążenia.

8. Upewnij się, że produkt nie jest luźny ani nie odstaje. Jeśli odczuwasz dyskomfort, powtórz kroki od początku, aby ponownie zamocować produkt.


Prawidłowo załozony produkt (prawa stopa)

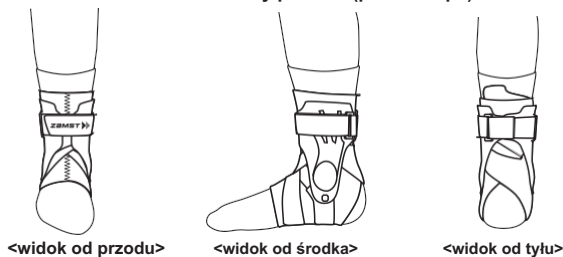

* Na ilustracji logo jest skierowane do przodu. Logo nie zawsze znajduje się na środku. Jego położenie może się różnić w zależności od użytkownika.

* W razie potrzeby wyreguluj pasek z logo, aby zapewnić dokładne dopasowanie.

Do produktu dołączone są dwie miękkie podkładki dystansowe. Wykorzystaj je, jeśli oryginalne osłony lub nity uciskają stopę i powodują dyskomfort.

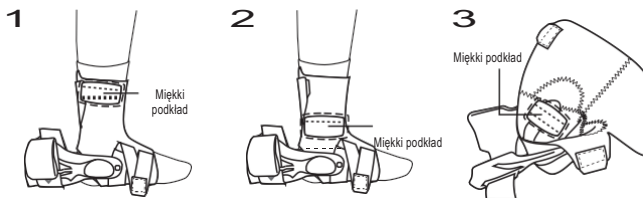

- 1 Jeśli miejsce ucisku znajduje się w górnej części stopy, zamocuj miękką podkładkę dystansową w górnej części ochraniacza.
- 2 Jeśli miejsce ucisku znajduje się na kostce, zamocuj element dystansowy na górnej części kostki.
- 3 Jeśli nit uciska stopę, zamocuj element dystansowy wewnątrz.

Reklamacje i skargi:

W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących produktu należy skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą. Powiadomienie producenta i właściwego organu państwa członkowskiego jest konieczne tylko w przypadku poważnych incydentów, które mogą prowadzić do znacznego pogorszenia stanu zdrowia lub śmierci. Poważne incydenty są zdefiniowane w art. 2 nr 65 rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR).

Zastrzeżenia:

* Cechy i wygląd produktu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia, aby go udoskonalić.

* Wyrzucając produkt należy przestrzegać wszystkich krajowych przepisów dotyczących utylizacji.

* Podejmujemy wszelkie działania, aby zapewnić jakość naszych produktów. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad itp. prosimy o kontakt z Nippon Sigmax Co., Ltd.

Nazwa „Zamst” i logo firmy „Zamst” są znakami towarowymi firmy Nippon Sigmax Co. Ltd, które są zastrzeżone w Japonii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach.