

ZAMST THUMB GUARD (ORERTZA NA RĘKĘ I PRZEDRAMIĘ) INSTRUKCJA UŻYCIA

Dziękujemy za zakup produktu Zamst.

Ze względów bezpieczeństwa przed użyciem proszę przeczytać niniejszą instrukcję. Należy ją przechowywać tak, aby w każdej chwili można z niej było łatwo skorzystać.

Podstawowe informacje:

- Produkt można stosować na prawą lub na lewą rękę.
- Przy pewnym stopniu zużycia produkt może nie zapewniać efektu stabilizującego.
- Produkt należy do grupy wyrobów medycznych stosowanych w celu zabezpieczenia przy zapobieganiu lub łagodzeniu skutków urazu.

Podczas korzystania z produktu:

- Ze względu na właściwości użytych materiałów produkt w niektórych warunkach przechowywania może zmienić kolor.
- Dbaj, aby nie odkształcić produktu kładąc na nim cięższe przedmioty podczas przechowywania – może to uszkodzić zapięcie na rzep.
- Nie pozostawiaj produktu w zbyt gorących lub wilgotnych miejscach. Może to spowodować pogorszenie jakości produktu lub jego rozwarstwienie.
- Ze względu na rodzaj użytego materiału na powierzchni produktu mogą powstać drobne zagłębienia, a jego kolor może ulec zmianie. Nie obniża to jakości produktu.

Środki ostrożności podczas użycia – przeczytaj koniecznie:

Środki ostrożności podzielono na dwie grupy, według stopnia ryzyka dla zdrowia.

OSTRZEŻENIA: dotyczą sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, które mogą spowodować poważną kontuzję.

UWAGI: dotyczą sytuacji mniej niebezpiecznych, które mogą spowodować łagodne kontuzje i/lub uszkodzenie produktu.

⚠ OSTRZEŻENIA

- Aby zapobiec kontuzji lub zaostrzeniu objawów, produktu nie powinny stosować:
 - osoby ze skłonnością do alergii lub wrażliwą skórą.
 - osoby, u których występuje złamanie, skaleczenie, drętwienie, obrzęk, egzema, wysypka skórna inne objawy w miejscu noszenia produktu.
- Nieprawidłowe stosowanie produktu może powodować problemy z krążeniem krwi lub kontuzje. Zawsze należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać produktu w prawidłowy sposób:
 - Produkt przeznaczony jest do noszenia wyłącznie w miejscu stawu kolanowego;
 - Zawsze należy stosować produkt w odpowiednim rozmiarze;
 - Nie stosować produktu podczas snu;
 - Aby założyć ortezę we właściwy sposób, przestrzegaj kolejności kroków przy jego zakładaniu;
 - Ortezę ani jej paski nie wolno zapinać zbyt ciasno.
 - Jeżeli ortezę rozluźni się lub spadnie podczas użycia, trzeba ją ponownie prawidłowo zapiąć. Przy dłuższym noszeniu trzeba zwrócić uwagę, aby siła ucisku była odpowiednia, a w razie potrzeby należy ją dostosować.
 - Jeżeli produkt nosi ślady zużycia, uszkodzenia albo zapięcie na rzep nie działa dobrze, produktu tego nie należy używać.
 - Nie wolno samemu zmieniać ani naprawiać produktu.
- W przypadku, gdy podczas użycia produktu wystąpi nietypowa sytuacja taka jak uraz, złamanie, ból, drętwienie, obrzęk, egzema, itp., natychmiast przestań używać produktu i skonsultuj się z lekarzem. Dalsze użycie może zaostrzyć objawy.

⚠ UWAGI

- Zapięcie na rzepie wyprodukowano z twardych materiałów. W rzadkich przypadkach może dojść do skaleczenia skóry na palcach lub w innym miejscu więc należy zachować ostrożność podczas używania produktu.
- Pod wpływem potu lub tarcia kolor produktu może wyblaknąć, a produkt może zafarbować inne tkaniny.
- Upewnij się, że zapięcie na rzep nie przyczepiło się do ubrania. W przeciwnym razie może ono zaciągnąć lub uszkodzić tkaninę

I Pielęgnacja i pranie

⚠ UWAGA

- Nie prać z jasnymi kolorami. Produkt może stracić kolor lub zafarbować inne tkaniny.
- W przypadku prania produktu razem z odzieżą itp. należy użyć siatki do prania, aby zapobiec zaciągnięciu lub uszkodzeniu tkaniny.

- Produkt można prać w pralce, w siateczce do prania. Po wypraniu suszyć w zacienionym miejscu.
- Podczas prania zapięcie na rzep musi być zapięte – w przeciwnym wypadku może ono ulec uszkodzeniu.
- Nie stosować wybielaczy na bazie jonów lub chloru. Można stosować wybielacze tlenowe.
- Nie suszyć w suszarce bębnowej - może to spowodować uszkodzenie produktu.
- Nie czyścić chemicznie. Można prać na mokro bez suszenia w suszarce bębnowej.

I Sposób formowania i użycia

• Orteza kciuka to produkt, który przed użyciem należy uformować tak, aby pasował do dłoni i palców. Do tego celu użyjesz gorącej wody.

Przed założeniem produktu należy uważnie przeczytać sekcję "Środki ostrożności dotyczące użytkowania". Następnie postępować zgodnie z instrukcjami, aby upewnić się, że produkt jest prawidłowo zamocowany.

- W poniższych krokach formowania i mocowania użyto przykład kciuka prawej ręki. Wykonaj te same czynności dla lewej ręki.

- Orteza żywicę, która mięknie w temperaturze około 70°C (158°F) i twardnieje po schłodzeniu.

- Jeśli podczas użytkowania produkt utraci swój pierwotny kształt, można go skorygować poprzez ponowne uformowanie. Produkt może być ponownie formowany około 20 razy.

1. Przygotuj ręcznik do osuszenia oraz pojemnik (np. miskę), który jest wystarczająco duży, aby umieścić w nim produkt.



Należy używać pojemnika odpornego na wysoką temperaturę.

2. Napełnij pojemnik gorącą wodą o temperaturze około 70°C (158°F).




3. Rozciągnij wszystkie rzepy produktu. Sprawdź górną/dolną i wewnętrzną/zewnętrzną część produktu.



Strona zewnętrzna

Umieść stronę z metką skierowaną w dół.

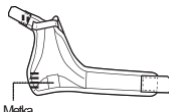

Strona wewnętrzna

Mocowanie produktu do dłoni.

4. Przytrzymaj pasek podtrzymujący i pasek na kciuk każdą ręką i zanurz produkt w gorącej wodzie na 15 do 20 sekund.



Należy uważać, aby nie poparzyć się przez przypadkowe zanurzenie dłoni w gorącej wodzie.

5. Wyjąć produkt z gorącej wody i osuszyć ręcznikiem.



Owiń produkt ręcznikiem, aby go osuszyć.

6. Upewnij się, że produkt ostygł na tyle, że można go dotknąć. Złóż produkt na pół od środka.



Uważaj, aby się nie poparzyć.

* Osiągnięcie przez produkt optymalnej temperatury po wyjęciu z gorącej wody zajmuje około 60-90 sekund.

Reklamacje i skargi:

W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących produktu należy skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą. Powiadomienie producenta i właściwego organu państwa członkowskiego jest konieczne tylko w przypadku poważnych incydentów, które mogą prowadzić do znacznego pogorszenia stanu zdrowia lub śmierci. Poważne incydenty są zdefiniowane w art. 2 nr 65 rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR).

Zastrzeżenia:


* Cechy i wygląd produktu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia, aby go udoskonalić.

* Wyrzucając produkt należy przestrzegać wszystkich krajowych przepisów dotyczących utylizacji.

* Podejmujemy wszelkie działania, aby zapewnić jakość naszych produktów. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad itp. prosimy o kontakt z Nippon Sigmam Co., Ltd.


Nazwa „Zamst” i logo firmy „Zamst” są znakami towarowymi firmy Nippon Sigmam Co. Ltd, które są zastrzeżone w Japonii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

7. Włóż pętlę na kciuk i umieść produkt w wybranym miejscu.

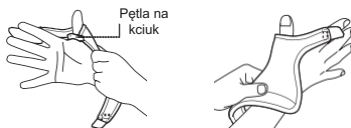


W przypadku nadajesz kształt dla produktu, który został już wcześniej uformowany, należy rozpocząć czynności od tego miejsca.

8. Zapnij pas.

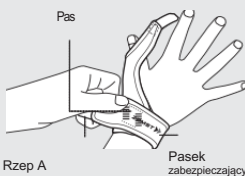

Lekko pociągnij pasek zabezpieczający. Następnie przymocuj zapięcie na rzep A.

9. Zapnij pasek kciuka.

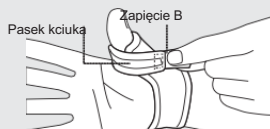

Zapnij zapięcie B, jednocześnie lekko pociągając za pasek na kciuk. Aby ułatwić zakładanie rękawic itp. na produkt, należy pociągnąć pasek w dół i zapiąć go.

Postępowanie podczas formowania produktu.

Naciśnij całą osłonę drugą ręką, aby dopasować ją do kształtu dłoni i palców. Poczekaj, aż osłona stwardnieje.



* Osłona stwardnieje w ciągu 3 do 4 minut po wyjęciu z gorącej wody.

* Jeśli chcesz, aby osłona stwardniała szybciej, włóż ją do zimnej wody. Jeśli osłona stwardnieje, trudno będzie ją uformować.

Wówczas ponownie zanurz w gorącej wodzie.

10. Upewnij się, że produkt nie jest luźny ani nie odstaje.

Jeśli odczuwasz dyskomfort, powtórz kroki od początku, aby ponownie zamocować produkt

Prawidłowo zapięty produkt (prawa ręka)



Środek dłoni



Bok



Góra

11. Po uformowaniu produktu wysusz w cieniu.