

ZAMST ZK-7 (ORTEZA STAWU KOLANOWEGO) INSTRUKCJA UŻYCIA

Dziękujemy za zakup produktu Zamst. Ze względów bezpieczeństwa przed użyciem proszę przeczytać niniejszą instrukcję. Należy ją przechowywać tak, aby w każdej chwili można z niej było łatwo skorzystać.

Podstawowe informacje:

- Ten produkt jest przeznaczony do stabilizacji ruchów bocznych i przednich kolana.
- Ten produkt może być używany zarówno na lewym, jak i prawym kolanie.
- Należy wybrać prawidłowy rozmiar i stosować zgodnie z instrukcją, w przeciwnym razie produkt może nie działać prawidłowo.
- Produkt należy do grupy wyrobów medycznych stosowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub złagodzenia skutków urazu.

Podczas korzystania z produktu:

- Należy uważać, aby zapięcia na rzepy nie stykały się z tkaniną siatkową z tyłu kolana.
- Ze względu na właściwości materiałów użytych w tym produkcie, kolor może ulec zmianie w zależności od warunków przechowywania.
- Podczas przechowywania produktu należy unikać nadmiernego obciążania zapięć na rzepy lub wypukłości tkaniny. W przeciwnym razie rzepy mogą nie działać skutecznie.

Środki ostrożności podczas użycia – przeczytaj koniecznie:

Środki ostrożności podzielono na dwie grupy, według stopnia ryzyka dla zdrowia.

⚠ OSTRZEŻENIE: dotyczą sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, które mogą spowodować poważny uraz.

⚠ UWAGA: dotyczą sytuacji mniej niebezpiecznych, które mogą spowodować łagodne urazy i/lub uszkodzenie produktu.

⚠ OSTRZEŻENIE

• Aby zapobiec kontuzji lub zaostrzeniu objawów, produktu nie powinny stosować:

- osoby ze skłonnością do alergii lub wrażliwą skórą.
- osoby, u których występuje złamanie, skaleczenie, drętwienie, obrzęk, egzema, wysypka skórna inne objawy w miejscu noszenia produktu.
- Nieprawidłowe stosowanie produktu może powodować problemy z krążeniem krwi lub kontuzje. Zawsze należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać produktu w prawidłowy sposób:
 - produkt przeznaczony jest do noszenia wyłącznie na kolanie;
 - zawsze należy stosować produkt w odpowiednim rozmiarze;
 - nie stosować produktu podczas snu;
 - aby założyć ortezę we właściwy sposób, przestrzegaj kolejności kroków przy zakładaniu;
 - ortezę i paski nie wolno zapinać zbyt ciasno. Jeżeli orteza rozluźni się lub spadnie podczas użycia, trzeba ją znów prawidłowo zapiąć. Przy dłuższym noszeniu trzeba zwrócić uwagę, aby siła ucisku była odpowiednia, a w razie potrzeby należy ją dostosować.
 - jeżeli produkt nosi ślady zużycia, uszkodzenia albo zapięcie na rzep nie działa dobrze, produktu tego nie należy używać.
 - nie wolno samemu zmieniać ani naprawiać produktu.
- W przypadku, gdy podczas użycia produktu wystąpi nietypowa sytuacja taka jak uraz, złamanie, ból, drętwienie, obrzęk, egzema, itp., natychmiast przestań używać produktu i skonsultuj się z lekarzem. Dalsze użycie może zaostrzyć objawy.

⚠ UWAGA

- Zapięcie na rzepy wyprodukowano z twardych materiałów. W rzadkich przypadkach może dojść do obtarć skóry na palcach lub w innym miejscu więc należy zachować ostrożność podczas używania produktu.
- Pod wpływem potu lub tarcia kolor produktu może wyblaknąć, a produkt może zafarbować inne tkaniny.
- Upewnij się, że zapięcie na rzep nie przyczepiło się do ubrania. W przeciwnym razie może ono zaciągnąć lub uszkodzić tkaninę.

I Pielęgnacja i pranie**⚠ UWAGA**

- Nie prać w jasnymi kolorami. Produkt może stracić kolor lub zafarbować inne tkaniny.
- W przypadku prania produktu razem z odzieżą itp. należy użyć siatki do prania, aby zapobiec zaciągnięciu lub uszkodzeniu tkaniny.


- Produkt można prać w pralce, w siateczce do prania. Po wypraniu suszyć w zacienionym miejscu.
- Podczas prania zapięcie na rzep musi być zapięte – w przeciwnym wypadku może ono ulec uszkodzeniu.
- Nie stosować wybielaczy na bazie jonów lub chloru. Nie prasować. Można stosować wybielacze tlenowe.
- Nie suszyć w suszarce bębnowej - może to spowodować uszkodzenie produktu.
- Nie czyścić chemicznie. Można prać na mokro bez suszenia w suszarce bębnowej.

I Sposób użycia

• Przed założeniem produktu uważnie przeczytaj punkt „Środki ostrożności podczas użycia – przeczytaj koniecznie”. Przy zakładaniu ortezy przestrzegaj niżej opisanych kroków, aby założyć ją prawidłowo.

- Poniższe kroki dotyczą prawej nogi. Wykonaj te same kroki dla lewej nogi.

1. Rozepnij wszystkie rzepy produktu. Sprawdź górną/dolną, wewnętrzną/zewnętrzną i przednią/tylną część produktu.

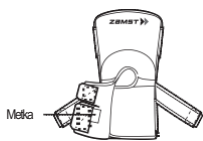


<widok z przodu>



<widok z tyłu>


Podczas zakładania produktu na kolano należy umieścić go stroną z mętką u dołu produktu.

2. Z logo skierowanym do góry, chwyć produkt obiema rękami i przesuń go do kolana, aż górna krawędź otworu na rzepkę znajdzie się około 2 cm (0,8 cala) powyżej górnej części rzepki.

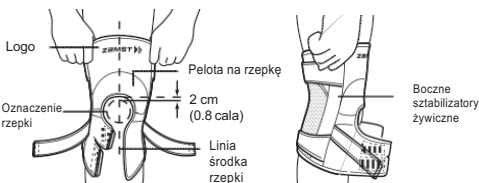


Wyrównaj środek produktu z linią środkową rzepki i wyreguluj produkt tak, aby podkładka rzepki otaczała rzepkę. Podczas przesuwania produktu w górę przytrzymaj górną część aktywnej żywicy

3. Wyprostuj kolano i zapnij rzep A.

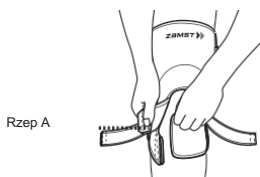


Zapnij rzep A, ciągnąc go ukośnie w dół, tak, aby otwór na rzepkę pasował do środka rzepki.

4. Zapięcie na rzep B zapewnia odpowiednią kompresję.

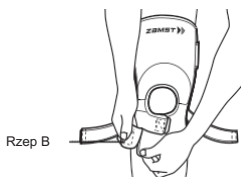

Wielokrotnie zapinaj każde zapięcie na rzep, aż do uzyskania odpowiedniej kompresji.

5. Zapnij paski krzyżowe poniżej kolana.

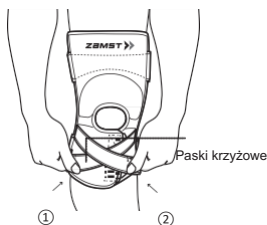


Zapnij paski krzyżowe ① oraz ② poniżej kolana tak jak wskazuje rysunek.

* Należy pamiętać o dociąganiu pasków z jednakową siłą.

* Gdy używasz z taśmami na kolanie, zwiększasz efekt działania.


6. Wyprostuj kolano i pociągnij paski krzyżowe, aby wyeliminować luz.

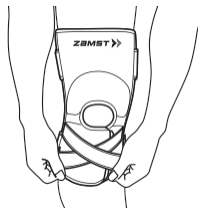

Podciągnij, jeśli wyczuwasz luz z tyłu kolana.

7. Upewnij się, że produkt nie jest luźny ani nie odstaje. Jeśli odczuwasz dyskomfort, powtórz czynności opisane powyżej.


Produkt prawidłowo zapięty (prawa noga)

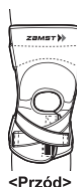

<Przód>




<Bok>

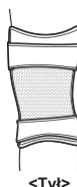

<Tył>

I Zdejmowanie

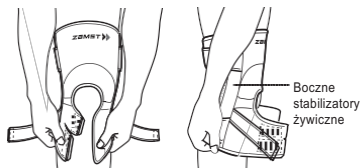

Podczas zdejmowania należy przytrzymać dolną część bocznych stabilizatorów żywiczych.

UWAGA

Nie ciągnij produkt z nadmierną siłą. Ponieważ może ulec uszkodzeniu.

Reklamacje i skargi:

W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących produktu należy skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą. Powiadomienie producenta i właściwego organu państwa członkowskiego jest konieczne tylko w przypadku poważnych incydentów, które mogą prowadzić do znacznego pogorszenia stanu zdrowia lub śmierci. Poważne incydenty są zdefiniowane w art. 2 nr 65 rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR).

Zastrzeżenia:

* Specyfikacja i wygląd produktu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia, aby go udoskonalili.

* Wyrzucając produkt należy przestrzegać wszystkich krajowych przepisów dotyczących utylizacji.

* Podejmujemy wszelkie działania, aby zapewnić jakość naszych produktów. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad itp. prosimy o kontakt z Nippon Sigma Co., Ltd.

Nazwa „ZAMST” i logo firmy „ZAMST” są znakami towarowymi firmy Nippon Sigma Co. Ltd, które są zastrzeżone w Japonii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach.