

Poniższe ilustracje pokazują jak prawidłowo dopasować wkładki do obuwia
Zamst AGILITY GRIP

1



2



3



4



Wkładki do butów Zamst Footcraft

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zaufanie i zakup produktu Zamst. Ze względów bezpieczeństwa przed użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

ZASTOSOWANIE

Wkładki do butów wspierające pracę stóp.

NAJPIERW TO PRZECZYTAJ

Niniejsza instrukcja dotyczy wkładek Zamst Footcraft. Ten produkt jest sprzedawany w parze dla prawej i lewej stopy. Przed użyciem należy upewnić się, która to para. W pewnych warunkach użytkowania wsparcie może nie być zapewnione przez ten produkt. Ten produkt nie może być stosowany do leczenia chorób, zaburzeń lub urazów stóp. Przed użyciem upewnij się, że rozmiar produktu jest prawidłowy. Należy zapoznać się z tabelą rozmiarów.

KIEDY NALEŻY STOSOWAĆ TEN PRODUKT?

Na początku stosowania może wystąpić dyskomfort. Należy powstrzymać się od stosowania przez dłuższy czas, aż do momentu, gdy ten dyskomfort zniknie.

Ze względu na właściwości materiałów użytych do produkcji, może on zmienić kolor w niektórych warunkach przechowywania. Produkt nie należy pozostawiać w miejscach o wysokiej temperaturze.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UŻYWANIA – NALEŻY TO PRZECZYTAĆ

Środki ostrożności są podzielone na następujące sekcje, w zależności od poziomu zagrożenia:

! OSTRZEŻENIE: wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może spowodować poważne obrażenia ciała.

! PRZESTROGA: wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może spowodować niewielkie obrażenia i/lub uszkodzeniem mienia innego niż ten produkt.

! OSTRZEŻENIE

Nie używać w przypadku wystąpienia na stopie urazu, złamania, skaleczenia, bólu, zdrętwienia, obrzęku, egzemy, wysypki, itp. Jeśli podczas użytkowania wystąpi którakolwiek z tych nieprawidłowości, należy natychmiast zaprzestać używania produktu i skonsultować się z lekarzem. Dalsze stosowanie może pogorszyć objawy. Należy pamiętać o przestrzeganiu poniższych zasad i prawidłowym stosowaniu produktu. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować problemy z krążeniem lub obrażenia ciała.

- Upewnij się, że używasz produktu o odpowiednim rozmiarze i typie łuku wysklepienia stopy. Zapoznaj się z tabelą rozmiarów i sposobem doboru wkładek na podstawie pomiaru łuku wysklepienia stopy.

- Podczas używania, usuń oryginalne wkładki z butów.

- Nie próbuj przetwarzać, modyfikować ani naprawiać tego produktu.

! PRZESTROGA

Ten produkt musi być noszony razem ze skarpetkami. Pot i tarcie mogą spowodować wyblaknięcie koloru tego produktu lub przejście koloru na inne materiały.

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

Ten produkt może być prany ręcznie. Po praniu należy usunąć wilgoć ręcznikiem i powiesić w cieniu do wyschnięcia. Nie należy używać suszarki. Może to spowodować uszkodzenie produktu.

* Specyfikacje produktu, widok zewnętrzny itp. mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia w celu ich ulepszenia.

* Podjęto wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia jakości produktu, ale w przypadku stwierdzenia wady itp. prosimy o kontakt z nami.

JAK APLIKOWAĆ PRODUKT?

1. Usuń oryginalne wkładki z butów (Ilustracja 1).
2. Umieść oryginalną wkładkę na górze produktu i zaznacz wokół palców (Ilustracja 2).
3. Wytnij dodatkową część wzdłuż oznaczenia (Ilustracja 3).
4. Włóż je do butów (Ilustracja 4).

MATERIAŁY:

Model [STANDARD]

Włókno: Poliester

Niewłókniste: EVA, Nylon

* Uwaga: podczas utylizacji tego produktu należy przestrzegać wszystkich rozporządzeń i przepisów dotyczących recyklingu, określonych przez władze lokalne.

Model [STANDARD CUSHION+]

Włókno: Poliester, Nylon

Niewłókniste: EVA, Nylon, Poliuretan.

* Uwaga: podczas utylizacji tego produktu należy przestrzegać wszystkich rozporządzeń i przepisów dotyczących recyklingu, określonych przez władze lokalne.

Model [AGILITY GRIP]

Włókno: Poliester

Niewłókniste: EVA, Nylon, imitacja skóry.

* Uwaga: podczas utylizacji tego produktu należy przestrzegać wszystkich rozporządzeń i przepisów dotyczących recyklingu, określonych przez władze lokalne.

Zastrzeżenie:

* Specyfikacje produktu, widok zewnętrzny itp. mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia w celu ich ulepszenia.

* Podjęto wszelkie możliwe działania w celu zapewnienia jakości produktu, ale w przypadku wykrycia wady itp. prosimy o kontakt z nami.

Dystrybutor na terenie Polski: Zamst Polska

www.zamst.com.pl