



ZAMST ZK-MOTION (ORTEZA STAWU KOLANOWEGO) INSTRUKCJA UŻYCIA

Dziękujemy za zakup produktu Zamst. Ze względów bezpieczeństwa przed użyciem proszę przeczytać niniejszą instrukcję. Należy ją przechowywać tak, aby w każdej chwili można z niej było łatwo skorzystać.

Podstawowe informacje:

- Ten produkt jest przeznaczony do stabilizacji ruchów bocznych i przednich kolana.
- Ten produkt może być używany zarówno na lewym, jak i prawym kolanie.
- Należy wybrać prawidłowy rozmiar i stosować zgodnie z instrukcją, w przeciwnym razie produkt może nie działać prawidłowo.
- Produkt należy do grupy wyrobów medycznych stosowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub złagodzenia skutków urazu.

Podczas korzystania z produktu:

- Na tkaninie mogą pojawić się zagniecenia, które mogą wydawać się wadą. Nie ma to jednak wpływu na jakość produktu.
- Ze względu na właściwości użytych materiałów produkt w niektórych warunkach przechowywania może zmienić kolor.
- Dbaj, aby nie odkształcić produktu kładąc na nim cięższe przedmioty podczas przechowywania – może to uszkodzić zapięcie na rzep.
- Nie pozostawiaj produktu w zbyt gorących lub wilgotnych miejscach. Może to spowodować pogorszenie jakości produktu lub jego zniszczenie.
- Ze względu na rodzaj użytego materiału na powierzchni produktu mogą powstać drobne zagłębienia, a jego kolor może ulec zmianie. Nie obniża to jakości produktu.

Środki ostrożności podczas użycia – przeczytaj koniecznie:

Środki ostrożności podzielono na dwie grupy, według stopnia ryzyka dla zdrowia.

⚠️ OSTRZEŻENIA: dotyczą sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, które mogą spowodować poważną kontuzję.

⚠️ UWAGI: dotyczą sytuacji mniej niebezpiecznych, które mogą spowodować łagodne kontuzje i/lub uszkodzenie produktu.

⚠️ OSTRZEŻENIA

- Aby zapobiec kontuzji lub zaostrzeniu objawów, produktu nie powinny stosować:
 - osoby ze skłonnością do alergii lub wrażliwą skórą.
 - osoby produkt zawiera kauczuk naturalny. Kauczuk naturalny zawiera alergeny lateksowe i może powodować reakcje alergiczne, takie jak swędzenie, pokrzywka i trudności w oddychaniu. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy, należy natychmiast zaprzestać używania produktu i zwrócić się o pomoc medyczną.
 - osoby, u których występuje złamanie, skaleczenie, drętwienie, obrzęk, egzema, wysypka skórna inne objawy w miejscu noszenia produktu.
- Nieprawidłowe stosowanie produktu może powodować problemy z krążeniem krwi lub kontuzje. Zawsze należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać produktu w prawidłowy sposób:
 - produkt przeznaczony jest do noszenia wyłącznie na kolanie;
 - zawsze należy stosować produkt w odpowiednim rozmiarze;
 - nie stosować produktu podczas snu;
 - aby założyć ortezę we właściwy sposób, przestrzegaj kolejności kroków przy zakładaniu;
 - ortezę i paski nie wolno zapinać zbyt ciasno. Jeżeli orteza rozluźni się lub spadnie podczas użycia, trzeba ją znów prawidłowo zapiąć. Przy dłuższym noszeniu trzeba zwrócić uwagę, aby siła ucisku była odpowiednia, a w razie potrzeby należy ją dostosować.
 - jeżeli produkt nosi ślady zużycia, uszkodzenia albo zapięcie na rzep nie działa dobrze, produktu tego nie należy używać.
 - nie wolno samemu zmieniać ani naprawiać produktu.
- W przypadku, gdy podczas użycia produktu wystąpi nietypowa sytuacja taka jak uraz, złamanie, ból, drętwienie, obrzęk, egzema, itp., natychmiast przestań używać produktu i skonsultuj się z lekarzem. Dalsze użycie może zaostrzyć objawy.

⚠️ UWAGA

- Pot i tarcie mogą powodować blaknięcie koloru tego produktu lub przenoszenie go na inne materiały.

I Pielęgnacja i pranie

⚠️ UWAGA

- Nie prać z jasnymi kolorami. Produkt może stracić kolor lub zafarbować inne tkaniny.
- W przypadku prania produktu razem z odzieżą itp. należy użyć siatki do prania, aby zapobiec zaciągnięciu lub uszkodzeniu tkaniny.

- Produkt można prać w palce, w siateczce do prania. Po wypraniu suszyć w zacienionym miejscu.
- Podczas prania zapięcie na rzep musi być zapięte – w przeciwnym wypadku może ono ulec uszkodzeniu.
- Nie stosować wybielaczy na bazie jonów lub chloru. Można stosować wybielacze tlenowe.
- Nie suszyć w suszarce bębnowej - może to spowodować uszkodzenie produktu.
- Nie czyścić chemicznie. Można prać na mokro bez suszenia w suszarce bębnowej.


I Sposób użycia

• Przed założeniem produktu uważnie przeczytaj punkt „Środki ostrożności podczas użycia – przeczytaj koniecznie”. Przy zakładaniu ortozy przestrzegaj niżej opisanych kroków, aby założyć ją prawidłowo.


• Poniższe kroki dotyczą prawej nogi. Wykonaj te same kroki dla lewej nogi.

1. Podczas zakładania produktu na kolano należy upewnić się, która to górna i dolna część produktu - strzałka na metce.

2. Chwyć obiema rękami za części chwytne po obu stronach i pociągnij je do góry.

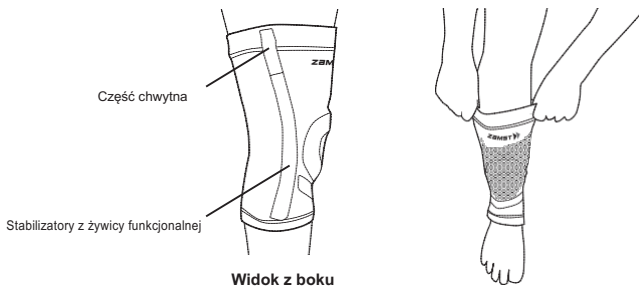


3. Przesuń ją w górę, aż dolna część rzepki zetknie się z wewnętrzną częścią okrągłej peloty 3D.

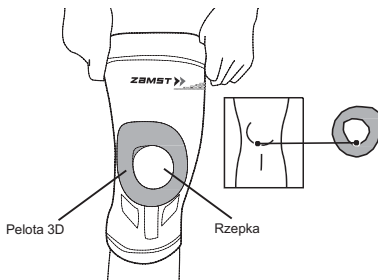

4. Upewnij się, że produkt nie jest luźny ani nie odstaje. Jeśli odczuwasz dyskomfort, powtórz kroki od początku, aby ponownie założyć produkt.

I Zdejmowanie

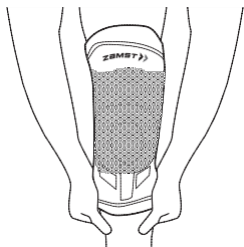

UWAGA

• Przytrzymaj dolny koniec bocznych stabilizatorów z żywicy funkcjonalnej po obu stronach i zdejmij ortezę kolana, pociągając go w dół.

* Unikaj wyjmowania produktu poprzez wywiniecie go na lewą stronę. Może to spowodować uszkodzenie bocznych stabilizatorów z żywicy funkcjonalnej.

Reklamacje i skargi:

W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących produktu należy skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą. Powiadomienie producenta i właściwego organu państwa członkowskiego jest konieczne tylko w przypadku poważnych incydentów, które mogą prowadzić do znacznego pogorszenia stanu zdrowia lub śmierci. Poważne incydenty są zdefiniowane w art. 2 nr 65 rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR).

Zastrzeżenia:

* Specyfikacja i wygląd produktu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia, aby go udoskonalić.

* Wyrzucając produkt należy przestrzegać wszystkich krajowych przepisów dotyczących utylizacji.

* Podejmujemy wszelkie działania, aby zapewnić jakość naszych produktów. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad itp. prosimy o kontakt z Nippon Sigmex Co., Ltd.

Nazwa „ZAMST” i logo firmy „ZAMST” są znakami towarowymi firmy Nippon Sigmex Co. Ltd, które są zastrzeżone w Japonii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach.